

Allgemeine Hinweise

1. Das **DIVARIO® 3D** Gingiva Dental-Resin ist ein lichthärtendes Resin für den 3D Druck von Zahnfleischmasken im DLP oder MSLA | LCD 3D Druckverfahren. Es eignet sich aufgrund der natürlichen rosa Einfärbung und der Flexibilität hervorragend für ästhetischen Zahnersatz in Verbindung mit **DIVARIO® 3D** Model Dental-Resin. Das **DIVARIO® 3D** Gingiva Dental-Resin kann in 3D Druckern mit 385 nm oder 405 nm Wellenlänge verwendet werden.
2. Das **DIVARIO® 3D** Gingiva Dental-Resin ist kein Medizinprodukt und ausschließlich für den 3D Druck von Zahnfleischmasken geeignet. Mälzer Dental GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden, die durch eine fehlerhafte Anwendung des Resins entstanden sind.
3. Zur sicheren Lagerung das fest verschlossene Resin an einem lichtgeschützten Ort bei 18 °C bis 28 °C aufbewahren. Nicht dem direkten Sonnenlicht und nur kurz dem Tageslicht aussetzen, da sonst eine vorzeitige Aushärtung stattfinden kann.
4. Bei der Entsorgung von flüssigem oder teilweise ausgehärtetem sowie in Isopropanol gebundenem Material sind die örtlichen / regionalen / nationalen und internationalen Vorschriften zu berücksichtigen.
5. Das Sicherheitsdatenblatt für das **DIVARIO® 3D** Gingiva Dental-Resin ist auf Anfrage bei **Mälzer Dental GmbH & Co. KG** erhältlich oder unter www.maelzer-dental.de

Gefahrenhinweise

- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H411 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Sicherheitshinweise

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P280 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen
P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

Bitte beachten Sie bei der Nutzung des **DIVARIO® 3D** Dental-Resins das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

FLEXIBEL. KOMPATIBEL. PASSGENAU.
mälzer dental



DIVARIO® Gingiva Dental-Resin  Gebrauchsanleitung

2023-REV-11-09

Schlesierweg 27 · 31515 Wunstorf
Telefon: +49 (0) 50 33 / 963099-0 · Telefax: +49 (0) 50 33 / 963099-99
E-Mail: info@maelzer-dental.de · Internet: www.maelzer-dental.de

mälzer dental 
FLEXIBEL. KOMPATIBEL. PASSGENAU.